


## 2. 使用上の注意

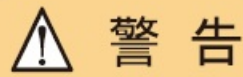

### 警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う恐れがある内容を示しています。



### 注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性、または物的損害が想定される内容を示しています。



### 警告

- ・ 医師からマッサージを禁じられている人は使用しないでください。
- ・ 目・口には使用しないでください。
- ・ 連続使用は30分以内にしてください。
- ・ 機械は改造しないでください。



### 警告

#### 禁忌・禁止

次の人は、ご使用前に医師に相談してください。

- ・ ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人。
- ・ 悪性しゅよう（腫瘍）のある人。
- ・ 心臓に障害のある人。
- ・ 妊娠初期の不安定期又は出産直後の人。
- ・ 糖尿病などによる高度な末梢循環障害からくる知覚障害のある人。
- ・ 皮膚に創傷のある人。
- ・ 安静を必要とする人。
- ・ 体温38℃以上（有熱期）の人。
- ・ 骨粗しょう（鬆）症の人、せきつい（脊椎）の骨折、急性とう（疼）痛性疾患の人。
- ・ 捻挫、肉離れなど炎症性のある人。
- ・ 背骨（脊椎）に異常のある人、又は背骨が左右に曲がっている人。
- ・ けんしょう（腱鞘）炎の人。
- ・ その他、医療機関で治療中の人。



## 注意

### 使用上の注意

- ・ 頭部やけい部（頸部）に使用しないでください。
- ・ 使用しても効果が現れない場合、医師/専門家又はシンアツシン指導センターに相談してください。
- ・ 浴室などの湿度の高いところで使用しないでください。
- ・ 自動車の運転をしながら使用しないでください。
- ・ 泥酔時には使用しないでください。
- ・ 体質に合わない人、金属アレルギーの人は使用しないでください。
- ・ 施療部位に装身具を付けて使用しないでください。
- ・ 本体に強い衝撃や異常な外力を加えないでください。
- ・ 使い始めは、弱い振動からマッサージを始めてください。
- ・ この機器は、表面が熱くなるため、熱に敏感でない人は、やけどのおそれがあるため、十分注意を払ってご使用ください。

### 1. 使用前の注意事項

- ・ 子供には使用させないでください。  
（乳幼児以外の子供で、保護者または、専門家の監督下での使用する場合を除く）
- ・ 子供には、本体の上で遊ばせたり、上に乗らせないでください。
- ・ 交流100V以外で使用しないでください。
- ・ すべてのコードは容易に離脱しないように、正しく確実に接続してください。
- ・ 使用開始から1週間は、1回の使用時間を15分以内にしてください。
- ・ バイブレータ本体、ホルダー、電源コード、スリーブ及び針の損傷がないか、調整ボリューム、切替スイッチなどが正常に作動するか確認してください。
- ・ しばらく使用しなかった機器を使用するときは、機器が正常に、かつ安全に作動することを確認してください。
- ・ 他の医療器と同時に使用しないでください。

### 2. 使用中の注意事項

- ・ 治療目的以外の用途で使用しないでください。
- ・ 機器に故障が発見された場合には使用を直ちに中止し、電源を切ってください。
- ・ 連続使用は30分以内にしてください。
- ・ 身体に異常を感じた時は使用を直ちに中止してください。
- ・ 停電の時は、直ちに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

### 3. 使用後及び保管時の注意事項

- ・ バイブレータスイッチを元の位置に戻した後、電源を切ってください。
- ・ コード類を取り外す時は、コードを持って引き抜くなどしてコードの接続部に無理な力をかけないでください。
- ・ 針先や筒先、機器本体、付属品などは、次回の使用に支障の無いよう清浄し、湿気の少ないところに整理・保管してください。
- ・ 長時間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・ お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・ 濡れた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。
- ・ コード類をキズ付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたりしないでください。
- ・ コード類は、ねじれを、ほどいて保管してください。

### 4. 保守・点検に関わる事項

- ・ 常に使用前後の点検を励行し、機器の故障又は異常が認められた場合には、販売店又は製造販売元に連絡してください。
- ・ 電源コードが破損した場合には、ご自身で交換しないようにしてください。販売店又は製造販売元に連絡してください。
- ・ 分解や修理、改造等加工は一切行わないでください。